

MediSet®

■ Perfusion

■ Sondage

Désignation	Code ACL	Prix LPPR* du conditionnement
■ MediSet Pose sur voie sous-cutanée avec un perfuseur 3 voies intégré	4363745	13,46 €
■ MediSet Pose sur voie périphérique I.V. ou S.C. avec un perfuseur 3 voies intégré	7632453	13,46 €
■ MediSet Pose "veines fragiles" I.V. ou S.C. avec un perfuseur 3 voies intégré	7751287	13,46 €
■ MediSet Pose sur voie périphérique I.V. ou S.C.	7480894	11,43 €
■ MediSet Pose sur chambre implantable ou cathéter central	7480902	8,08 €
■ MediSet Pose sur chambre implantable avec une aiguille de Huber Type II 20G	7480919	14,84 €
■ MediSet Remplissage / Reconstitution pour perfuseur ou diffuseur	7480865	8,99 €
■ MediSet Remplissage / Reconstitution pour pousse-seringue	7480871	15,24 €
■ MediSet Remplissage / Reconstitution pour systèmes actifs hors pousse-seringue	7808225	NR
■ MediSet Rinçage / Héparinisation avec une pince MediSecur	7480925	6,56 €
■ MediSet Rinçage / Héparinisation avec une aiguille de Huber Type II 20G et une pince MediSecur	4442516	13,32 €
■ MediSet Sondage urinaire avec poche de recueil 2 litres intégrée	4363768	8,30 €
■ MediSet Sondage urinaire	4363751	6,10 €

* Remboursé Sécurité Sociale

MediSet®

■ Pansement

Désignation	Code ACL
■ MediSet Déterision (10 soins complets)	4433983
■ MediSet Cavités (10 soins complets)	4434014
■ MediSet Pansement Mousse Peaux fragilisées (10 soins complets)	4314333
■ MediSet Hydrocolloïde (10 soins complets)	4314327
■ MediSet Hydrotul (5 soins complets)	4700906
■ MediSet Gras/Absorbant (10 soins complets)	4434008
■ MediSet Sec (5 soins complets)	7632476
■ MediSet Sec Post-Op (5 soins complets)	4297646

MediSet®

Codification couleurs
selon la norme ISO 60009 : 1992

Aiguilles de Huber		
Code couleur	Gauge*	Diamètre externe (mm)
■ Violet	24 G	0,6 - 0,7
■ Gris foncé	22 G	0,7
■ Jaune	20 G	0,9
■ Beige	19 G	1,1

Microperfuseurs - Epicraniennes		
Code couleur	Gauge*	Diamètre externe (mm)
■ Orange	25 G	0,5
■ Violet	24 G	0,55
■ Noir	22 G	0,7
■ Jaune	20 G	0,9
■ Beige	19 G	1,0

Cathéters courts		
Code couleur	Gauge*	Diamètre externe (mm)
■ Jaune	24 G	0,6 à 0,7
■ Bleu	22 G	0,7 à 0,9
■ Rose	20 G	0,9 à 1,1
■ Vert	18 G	1,1 à 1,3
■ Gris	16 G	1,5 à 1,8
■ Orange	14 G	1,8 à 2,2

*Gauge : diamètre interne de l'aiguille.

MediSet®

Tableau de conversion pour le calcul du débit du goutte-à-goutte

Volume à perfuser	Durée en heure	Débit* ml/h	Nombre** de gouttes par minute pour un perfuseur ayant un débit de 20 gouttes/ml
125 ml	1	125	42
	2	60	20
	4	30	10
	6	20	7
	8	15	5
	12	10	3
200 ml	1	200	67
	2	100	33
	4	50	17
	5	40	13
	8	25	8
	12	15	5
250 ml	1	250	83
	2	125	42
	5	50	17
	6	40	13
	8	30	10
	12	20	7
24	10	3	
500 ml	2	250	83
	3	165	55
	6	80	27
	8	60	20
	12	40	13
	24	20	7
1000 ml	4	250	83
	6	165	55
	8	125	42
	12	80	27
	18	60	20
	24	40	13

* Ces affichages correspondent à une précision de $\pm 10\%$

** Le nombre de gouttes par minute est arrondi au chiffre le plus proche



MediSet® Perfusion,

set de pose pour voie sous-cutanée
avec un perfuseur 3 voies intégré



► Blister contenant :

- 1 carré d'essuyage
- 1 champ absorbant imperméable 38 x 45 cm
- 5 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm
- 1 seringue 3 pièces 20 ml LL*
- 1 aiguille 18 G 1 1/2*
- 1 cathéter court 22 G* (bleu)
- 1 aiguille épicroanienne 25 G* (orange)
- 1 perfuseur avec un robinet 3 voies*
- 1 pansement adhésif transparent*
- 1 bandelette adhésive double

► Hors blister :

- + 1 sachet de gel hydro-alcoolique
- + 1 sac à déchets de soins (perforants interdits)
- + 1 fiche mode d'emploi

► Prescrire :

xxx MediSet® perfusion, pour voie sous-cutanée avec perfuseur 3V intégré - QSP pour xxx perfusions

Désignation	Référence	Nbre blisters / boîte	Code ACL	Tarif LPPR
MediSet® Pose sur voie sous-cutanée avec un perfuseur 3 voies intégré	470846	1	4363745	13,46 €

* Sous présentation stérile apyrogène.

** Remboursé Sécurité Sociale.



MediSet® Perfusion,

set de pose pour voie sous-cutanée
avec un perfuseur 3 voies intégré

► Mode d'emploi :



- Préparation du sac collecteur de déchets et des différents éléments injectables prescrits.



- Lavage hygiénique des mains. Peler le blister.
- Mettre en place le champ de table et disposer tous les composants du blister.
- Réaliser l'antisepsie du bouchon du flacon.

FLACON VERRE



- Connecter le perfuseur au flacon.
Purger la tubulure du perfuseur.



OU

POCHE SOUPLE



- Connecter le perfuseur à la poche et purger la tubulure du perfuseur.



- Réaliser l'asepsie du point de ponction à l'aide des compresses imprégnées de l'antiseptique prescrit.



- Nettoyage des mains à l'aide du gel antiseptique prescrit. Poser l'aiguille épicroanienne et réaliser la perfusion par voie sous-cutanée.



- Rassembler les déchets dans le sac collecteur, (hors piquant, coupant, tranchant).



MediSet® Perfusion,

set de pose sur voie périphérique I.V. ou S.C.
avec un perfuseur 3 voies intégré



► Blister contenant :

- 1 carré d'essuyage
- 2 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm
- 1 paire de gants T.M en latex sous emballage portefeuille
- 2 champs absorbants imperméables 38 x 45 cm
- 8 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm
- 1 perfuseur avec un robinet 3 voies*
- 1 seringue 3 pièces 20 ml LL*
- 1 aiguille 18 G 1^{1/2}*
- 1 ampoule 20 ml de NaCl à 0,9 % pour rinçage ou purge
- 1 cathéter court 20 G* (rose)
- 1 aiguille épicroanienne 25 G* (orange)
- 1 aiguille épicroanienne 22 G* (noire)
- 1 pansement adhésif transparent*
- 1 bandelette adhésive double
- 1 bouchon obturateur de cathéter*

► Hors blister :

- + 1 sachet de gel hydro-alcoolique
- + 1 sac à déchets de soins (perforants interdits)
- + 1 fiche mode d'emploi

► Prescrire :

xxx MediSet® Pose, IV ou SC avec perfuseur
- QSP pour xxx perfusions

Désignation	Référence	Nbre blisters / boîte	Code ACL	Tarif LPPR
MediSet® Pose sur voie périphérique I.V. ou S.C. avec un perfuseur 3 voies intégré	470409	1	7632453	13,46 €

* Sous présentation stérile apyrogène.

** Remboursé Sécurité Sociale.



MediSet® Perfusion, set de pose sur voie périphérique I.V. ou S.C. avec un perfuseur 3 voies intégré

► Mode d'emploi :



- Préparation du sac collecteur de déchets.



- Lavage hygiénique des mains. Peler le blister.
- Mettre en place le champ de table et disposer tous les composants du blister.
- Réaliser l'antisepsie du bouchon du flacon.

FLACON VERRE



- Percuter le perfuseur dans le flacon.
Purger la tubulure.



OU

POCHE SOUPLE



- Percuter le perfuseur dans la poche.
Purger la tubulure.



- Positionner le champ sous le bras du patient et réaliser l'asepsie du point de ponction à l'aide des compresses imprégnées de l'antiseptique prescrit.



- Nettoyage des mains à l'aide du gel antiseptique.
- Enfiler les gants stériles.



- Poser la voie veineuse ou sous-cutanée, et réaliser la perfusion.



- Rassembler les déchets dans le sac collecteur, (hors piquant, coupant, tranchant).



MediSet® Perfusion,

set de pose "veines fragiles" I.V. ou S.C.
avec un perfuseur 3 voies intégré



► Blister contenant :

- 1 carré d'essuyage
- 2 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm
- 1 paire de gants T.M en latex sous emballage portefeuille
- 2 champs absorbants imperméables 38 x 45 cm
- 8 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm
- 1 seringue 3 pièces 20 ml LL*
- 1 aiguille 18 G 1^{1/2}*
- 1 ampoule 20 ml de NaCl à 0,9 % pour rinçage ou purge
- 1 perfuseur avec un robinet 3 voies*
- 1 cathéter court 22 G* (bleu)
- 1 aiguille épicroténienne 25 G* (orange)
- 1 bouchon obturateur de cathéter*
- 1 pansement adhésif transparent*
- 1 bandelette adhésive double

► Hors blister :

- + 1 sachet de gel hydro-alcoolique
- + 1 sac à déchets de soins (perforants interdits)
- + 1 fiche mode d'emploi

► Prescrire :

xxx MediSet® Pose, "veines fragiles" IV ou SC
avec perfuseur 3 V intégré - QSP pour xxx perfusions

Désignation	Référence	Nbre blisters / boîte	Code ACL	Tarif LPPR
MediSet® Pose "veines fragiles" I.V. ou S.C. avec un perfuseur 3 voies intégré	LPPR** 470546	1	7751287	13,46 €

* Sous présentation stérile apyrogène.

** Remboursé Sécurité Sociale.



MediSet® Perfusion,

set de pose "veines fragiles" I.V. ou S.C.
avec un perfuseur 3 voies intégré

► Mode d'emploi :



- Préparation du sac collecteur de déchets et des différents éléments injectables prescrits.



- Lavage hygiénique des mains. Peler le blister.
- Mettre en place le champ de table et disposer tous les composants du blister.
- Réaliser l'antisepsie du bouchon du flacon.

FLACON VERRE



- Percuter le perfuseur dans le flacon. Purger la tubulure.



OU

POCHE SOUPLE



- Percuter le perfuseur dans la poche. Purger la tubulure.



- Positionner le champ sous le bras du patient et réaliser l'asepsie du point de ponction à l'aide des compresses imprégnées de l'antiseptique prescrit.



- Nettoyage des mains à l'aide du gel antiseptique.
- Enfiler les gants stériles.



- Poser la voie veineuse ou sous-cutanée, et réaliser la perfusion.



- Rassembler les déchets dans le sac collecteur, (hors piquant, coupant, tranchant).



MediSet® Perfusion,

set de pose sur voie périphérique I.V. ou S.C.



► Blister contenant :

- 1 carré d'essuyage
- 2 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm
- 1 paire de gants d'examen T.M en latex présentés manchettes retournées
- 1 champ absorbant imperméable 60 x 60 cm
- 1 champ absorbant imperméable 38 x 45 cm
- 8 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm
- 1 prolongateur avec un robinet 3 voies intégré*
- 1 seringue 3 pièces 20 ml LL*
- 1 aiguille 18 G 1^{1/2} *
- 1 ampoule 20 ml de NaCl à 0,9 % pour rinçage ou purge
- 1 cathéter court 20 G* (rose)
- 1 aiguille épicroanienne 25 G* (orange)
- 1 aiguille épicroanienne 22 G* (noire)
- 1 pansement adhésif transparent*
- 1 bandelette adhésive double
- 1 bouchon obturateur de cathéter*

► Hors blister :

- + 1 sachet de gel hydro-alcoolique
- + 1 sac à déchets de soins (perforants interdits)
- + 1 fiche mode d'emploi

► Prescrire :

xxx MediSet® Pose, IV ou SC
- QSP pour xxx perfusions

Désignation	Référence	Nbre blisters / boîte	Code ACL	Tarif LPPR
MediSet® Pose sur voie périphérique I.V. ou S.C.	470265	1	7480894	11,43 €

* Sous présentation stérile apyrogène.

** Remboursé Sécurité Sociale.



MediSet® Perfusion, set de pose sur voie périphérique I.V. ou S.C.

► Mode d'emploi :



- Préparation du sac collecteur de déchets et des différents éléments injectables prescrits.



- Lavage hygiénique des mains.



- Peler le blister.
- Positionner le champ sous le bras du patient et réaliser l'asepsie du point de ponction à l'aide des compresses imprégnées de l'antiseptique prescrit.



- Nettoyage des mains à l'aide du gel antiseptique.



- Enfiler un premier gant stérile.
- Mettre en place le champ de table et disposer tous les composants du blister.
- Purger le système prolongateur à l'aide de l'ampoule NaCl.



- Enfiler le deuxième gant stérile.
Poser la voie veineuse ou sous-cutanée, et réaliser la perfusion.



- Rassembler les déchets dans le sac collecteur. (hors piquant, coupant, tranchant).



MediSet® Perfusion,

set de pose sur chambre implantable
ou cathéter central



► Blister contenant :

- 2 masques de soins chirurgicaux
- 1 charlotte
- 1 carré d'essuyage
- 1 paire de gants d'examen T.M en latex présentés manchettes retournées
- 1 champ absorbant imperméable 38 x 45 cm
- 5 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm
- 1 champ absorbant imperméable troué préfendu adhésif 50 x 50 cm
- 1 paire de gants T.M en latex sous emballage portefeuille
- 5 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm
- 1 seringue 3 pièces 20 ml LL*
- 1 aiguille 18 G 1^{1/2}*
- 1 ampoule 20 ml de NaCl à 0,9 % pour rinçage ou purge
- 1 prolongateur avec un robinet 3 voies intégré*
- 1 pansement adhésif transparent*
- 1 bandelette adhésive double

► Hors blister :

- + 1 sachet de gel hydro-alcoolique
- + 1 sac à déchets de soins (perforants interdits)
- + 1 fiche mode d'emploi

► Prescrire :

xxx MediSet® Pose, CI ou cathéter central sans aiguille
- QSP pour xxx perfusions

Désignation	Référence	Nbre blisters / boîte	Code ACL	Tarif LPPR
MediSet® Pose sur chambre implantable ou cathéter central	470266	1	7480902	8,08 €

* Sous présentation stérile apyrogène.

** Remboursé Sécurité Sociale.



MediSet® Perfusion, set de pose sur chambre implantable ou cathéter central

► Mode d'emploi :



- Préparation du sac collecteur de déchets.



- Lavage hygiénique des mains.
- Préparation des différents éléments injectables.



- Peler le blister. Mettre le masque au patient puis mettre masque et charlotte.



- Enfiler un premier gant. Déplier le champ de table sur le plan de travail. Imprégner les compresses de l'antiseptique prescrit.
- Enfiler le deuxième gant.
- Réaliser à l'aide des compresses l'asepsie large de la zone où se situe la chambre implantable ou le cathéter central.



- Positionner le champ troué préfendu sur le patient.
- Oter les gants.
- Nettoyage des mains à l'aide du gel antiseptique.
- Enfiler un nouveau gant.
- Disposer sur le champ les composants du blister.



- Purger le système prolongateur et le robinet 3 voies avec l'ampoule de NaCl .
- Enfiler le deuxième gant et réaliser le soin.



- Rassembler les déchets dans le sac collecteur. (hors piquant, coupant, tranchant).



MediSet® Perfusion,

set de pose sur chambre implantable
avec aiguille de Huber type II 20G



► Blister contenant :

- 2 masques de soins chirurgicaux
- 1 charlotte
- 1 carré d'essuyage
- 1 paire de gants d'examen T.M en latex présentés manchettes retournées
- 1 champ absorbant imperméable 60 x 60 cm
- 5 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm
- 1 champ absorbant imperméable troué adhésif 50 x 50 cm
- 1 paire de gants T.M en latex sous emballage portefeuille
- 5 compresses en nontissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 seringue 3 pièces 20 ml LL*
- 1 aiguille 18 G 1^{1/2}*
- 1 ampoule 20 ml de NaCl 0,9 % pour rinçage ou purge
- 1 aiguille de Huber type II 20G*
- 1 robinet 3 voies*
- 1 pansement adhésif transparent*
- 1 bandelette adhésive double

► Hors blister :

- + 1 sachet de gel hydro-alcoolique
- + 1 sac à déchets de soins (perforants interdits)
- + 1 fiche mode d'emploi

► Prescrire :

xxx MediSet® Pose, CI sur chambre implantable avec aiguille de Huber type II - QSP pour xxx pose d'aiguille***

Désignation	Référence	Nbre blisters / boîte	Code ACL	Tarif LPPR
MediSet® Pose sur chambre implantable avec une aiguille de Huber Type II 20G	470262	1	7480919	14,84 €

* Sous présentation stérile apyrogène.

** Remboursé Sécurité Sociale.

*** Limité à 3 "MediSet Pose" par semaine



MediSet® Perfusion, set de pose sur chambre implantable avec aiguille de Huber type II 20G

► Mode d'emploi :



- Préparation du sac collecteur de déchets.



- Lavage hygiénique des mains.
- Préparation des différents éléments injectables.



- Peler le blister. Mettre le masque au patient puis mettre masque et charlotte.



- Enfiler un premier gant. Déplier le champ de table sur le plan de travail. Imprégner les compresses de l'antiseptique prescrit.
- Enfiler le deuxième gant.
- Réaliser à l'aide des compresses l'asepsie large de la zone où se situe la chambre implantable.



- Positionner le champ troué préférendu sur le patient.
- Oter les gants.
- Nettoyage des mains à l'aide du gel antiseptique.
- Enfiler un nouveau gant.
- Disposer sur le champ les composants du blister.



- Purger le système prolongateur et l'aiguille de Huber à l'aide de l'ampoule NaCl .
- Enfiler le deuxième gant et réaliser le soin.



- Rassembler les déchets dans le sac collecteur. (hors coupant, piquant, tranchant)

HARTMANN



MediSet® Perfusion,

set de remplissage/reconstitution
pour perfuseur ou diffuseur



► Blister contenant :

- 1 masque de soins chirurgical
- 1 charlotte
- 1 carré d'essuyage
- 1 paire de gants T.M en latex sous emballage portefeuille
- 1 champ absorbant imperméable 60 x 60 cm
- 2 x 5 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm
- 1 seringue 3 pièces 20 ml LL*
- 1 seringue 3 pièces 10 ml L*
- 2 aiguilles 18 G 1/2*
- 1 ampoule 20 ml de NaCl à 0,9% pour rinçage ou purge
- 1 prise d'air hydrophobe*
- 1 bouchon LL*
- 1 bandelette adhésive double

► Hors blister :

- + 1 sachet de gel hydro-alcoolique
- + 1 sac à déchets de soins (perforants interdits)
- + 1 fiche mode d'emploi

► Prescrire :

xxx MediSet® Remplissage/Reconstitution, pour perfuseur ou diffuseur - QSP pour xxx perfusions

Désignation	Référence	Nbre blisters / boîte	Code ACL	Tarif LPPR
MediSet® Remplissage/Reconstitution pour perfuseur ou diffuseur	470261	1	7480865	8,99 €

* Sous présentation stérile apyrogène.

** Remboursé Sécurité Sociale.



MediSet® Perfusion, set de remplissage/reconstitution pour perfuseur ou diffuseur

► Mode d'emploi :



- Préparation du sac collecteur de déchets.



- Lavage hygiénique des mains.
- Préparation des différents éléments injectables prescrits.



- Peler le blister. Mettre le masque et la charlotte.




- Nettoyage des mains à l'aide du gel antiseptique.



- Enfiler les gants.
- Mettre en place le champ de table et disposer tous les composants du blister.
- Préparer la perfusion



- Rassembler les déchets dans le sac collecteur. (hors piquant, coupant, tranchant).

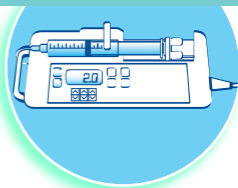

MediSet® Perfusion,

set de remplissage/reconstitution
pour pousse-seringue



► Blister contenant :

- 1 masque de soins chirurgical
- 1 carré d'essuyage
- 1 paire de gants T.M en latex sous emballage portefeuille
- 1 champ absorbant imperméable 60 x 60 cm
- 2 x 5 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm
- 1 seringue 3 pièces 60 ml LL*
- 1 seringue 3 pièces 20 ml LL*
- 1 seringue 3 pièces 10 ml L*
- 2 aiguilles 18 G 1^{1/2}*
- 1 prise d'air hydrophobe*
- 1 prolongateur 150 cm mâle/femelle*
- 1 bouchon LL*
- 1 bandelette adhésive double

► Hors blister :

- + 1 sachet de gel hydro-alcoolique
- + 1 sac à déchets de soins (perforants interdits)
- + 1 fiche mode d'emploi

► Prescrire :

xxx MediSet® Remplissage/Reconstitution, pour pousse seringues - QSP pour xxx perfusions

Désignation	Référence	Nbre blisters / boîte	Code ACL	Tarif LPPR
MediSet® Remplissage/ Reconstitution pour pousse-seringue	470264	1	7480871	15,24 €

* Sous présentation stérile apyrogène.

** Remboursé Sécurité Sociale.



MediSet® Perfusion, set de remplissage/reconstitution pour pousse-seringue

► Mode d'emploi :



- Préparation du sac collecteur de déchets.



- Lavage hygiénique des mains.
- Préparation des différents éléments injectables prescrits.



- Peler le blister. Mettre le masque.



- Nettoyage des mains à l'aide du gel antiseptique.



- Enfiler les gants.
- Mettre en place le champ de table et disposer tous les composants du blister.
- Remplir la seringue de 60 ml LL.
- Purger le prolongateur.



- Rassembler les déchets dans le sac collecteur. (hors piquant, coupant, tranchant).



MediSet® Perfusion,

set de remplissage/reconstitution pour systèmes actifs hors pousse-seringue



► Blister contenant :

- 1 paire de gants T.M en latex sous emballage portefeuille
- 1 champ absorbant imperméable 38 x 45 cm
- 1 seringue 3 pièces 60 ml LL*
- 1 aiguille 18 G 1^{1/2}*
- 5 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm

► Prescrire :

xxx MediSet® Remplissage/Reconstitution, pour systèmes actifs hors pousse-seringue - QSP pour xxx perfusions

Désignation	Référence	Nbre blisters / carton	Code ACL	Tarif LPPR
MediSet® Remplissage/Reconstitution pour systèmes actifs hors pousse-seringue	470263	12	7808225	NR

* Sous présentation stérile apyrogène.



MediSet® Perfusion, set de remplissage/reconstitution pour systèmes actifs hors pousse-seringue

► Mode d'emploi :



- Lavage hygiénique des mains.
- Peler le blister.



- Enfiler un premier gant.
- Mettre en place le champ de table et disposer tous les composants du blister.



- Enfiler le deuxième gant stérile et effectuer le remplissage de l'accessoire à l'aide de la seringue 60 ml.



- Effectuer les raccordements suivant un mode aseptique en utilisant les compresses imprégnées de l'antiseptique prescrit.



MediSet® Perfusion,

set de rinçage/héparinisation
avec une pince MediSecur®



► Blister contenant :

- 2 masques de soins chirurgicaux
- 1 charlotte
- 1 carré d'essuyage
- 1 paire de gants d'examen T.M en latex présentés manchettes retournées
- 1 champ absorbant imperméable 60 x 60 cm
- 5 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm
- 1 champ absorbant imperméable troué adhésif 50 x 50 cm
- 1 paire de gants T.M en latex sous emballage portefeuille
- 5 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm
- 1 prolongateur avec un robinet 3 voies intégré*
- 1 seringue 3 pièces 20 ml LL*
- 1 seringue 3 pièces 10 ml LL*
- 1 aiguille 18 G 1^{1/2}*
- 1 ampoule 20 ml de NaCl à 0,9 % pour rinçage ou purge
- 1 bouchon LL*
- 1 pansement adhésif transparent*
- 1 bandelette adhésive double
- 1 pince MediSecur® : ôte aiguille de Huber

► Hors blister :

- + 1 sachet de gel hydro-alcoolique
- + 1 sac à déchets de soins (perforants interdits)
- + 1 fiche mode d'emploi

► **Prescrire :** xxx MediSet® Rinçage/Héparinisation, pour chambre implantable ou cathéter central avec pince MediSecur® - QSP pour xxx rinçage/héparinisation

Désignation	Référence	Nbre blisters / boîte	Code ACL	Tarif LPPR
MediSet® Rinçage/ Héparinisation avec une pince MediSecur	LPPR** 470267	1	7480925	6,56 €

* Sous présentation stérile apyrogène.

** Remboursé Sécurité Sociale.



MediSet® Perfusion, set de rinçage/héparinisation avec une pince MediSecur®

► Mode d'emploi :



- Préparation du sac collecteur de déchets.



- Lavage hygiénique des mains.
- Préparation des différents éléments injectables.



- Peler le blister. Mettre le masque au patient, puis mettre masque et charlotte.



- Nettoyage des mains à l'aide du gel antiseptique.
- Enfiler un premier gant.
- Mettre en place le champ de table et disposer tous les composants du blister. Dans cette phase, on utilisera la main gantée pour manipuler les éléments stériles et la main nue pour le non stérile.



- Purger le prolongateur à l'aide de l'ampoule NaCl.
- Enfiler le deuxième gant stérile et réaliser le soin.



- Le soin terminé rassembler les déchets dans le sac collecteur (hors piquant, coupant, tranchant).

HARTMANN



MediSet® Perfusion,

set de rinçage/héparinisation pour chambre implantable **avec une aiguille de Huber type II 20G et une pince MediSecur®**



► Blister contenant :

- 2 masques de soins chirurgicaux
- 1 charlotte
- 1 carré d'essuyage
- 1 paire de gants d'examen T.M en latex présentés manchettes retournées
- 1 champ absorbant imperméable 60 x 60 cm
- 5 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm
- 1 champ absorbant imperméable troué adhésif 50 x 50 cm
- 1 paire de gants T.M en latex sous emballage portefeuille
- 5 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm
- 1 seringue 3 pièces 20 ml LL *
- 1 seringue 3 pièces 10 ml LL*
- 1 aiguille 18 G 1^{1/2}*
- 1 ampoule 20 ml de NaCl 0,9% pour rinçage ou purge
- 1 robinet 3 voies*
- 1 aiguille de Huber de type II 20G*
- 1 pansement adhésif transparent*
- 1 bandelette adhésive double
- 1 pince MediSecur® : ôte aiguille de Huber

► Hors blister :

- + 1 sachet de gel hydro-alcoolique
- + 1 sac à déchets de soins (perforants interdits)
- + 1 fiche mode d'emploi

► **Prescrire :** xxx MediSet® Rinçage/Héparinisation, sur chambre implantable avec aiguille de Huber type II et pince MediSecur®- QSP pour xxx rinçage/héparinisation***

Désignation	Référence	Nbre blisters / boîte	Code ACL	Tarif LPPR
MediSet® Rinçage/Héparinisation avec une aiguille de Huber Type II 20G et une pince MediSecur®	470276	1	4442516	13,32 €

* Sous présentation stérile apyrogène.

** Remboursé Sécurité Sociale.

*** Limité à 3 "MediSet rinçage/héparinisation" par semaine.



MediSet® Perfusion, set de rinçage/héparinisation pour chambre implantable avec une aiguille de Huber type II 20G

► Mode d'emploi :



- Préparation du sac collecteur de déchets.



- Lavage hygiénique des mains.
- Préparation des différents éléments injectables prescrits.



- Peler le blister. Mettre le masque au patient, puis mettre masque et charlotte.



- Enfiler un premier gant. Déplier le champ de table sur le plan de travail. Imprégner les compresses de l'antiseptique prescrit.
- Enfiler le deuxième gant.
- Réaliser à l'aide des compresses l'asepsie large de la zone où se situe la chambre implantable.



- Positionner le champ troué préfabriqué sur le patient.
- Oter les gants.
- Nettoyage des mains à l'aide du gel antiseptique.
- Enfiler un nouveau gant.
- Disposer sur le champ les composants du blister.



- Purger le système prolongateur et l'aiguille de Huber à l'aide de l'ampoule NaCl.
- Enfiler le deuxième gant stérile et réaliser le soin.



- Rassembler les déchets dans le sac collecteur. (hors piquant, coupant, tranchant).



MediSet® Sondage,

set de sondage urinaire
avec poche de recueil 2 litres intégrée



► Blister contenant :

Toilette hygiénique :

- 1 seringue 10 ml*
- 1 gant de toilette en nontissé
- 1 carré d'essuyage 30 x 40 cm

Toilette antiseptique :

- 1 sachet de gel hydro-alcoolique pour les mains
- 1 paire de gants d'examen T.M en latex présentés manchettes retournées
- 1 champ absorbant imperméable 60 x 60 cm
- 5 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm
- 5 tampons en nontissé taille prune

Sondage :

- 1 masque de soins chirurgical
- 1 sachet de gel hydro-alcoolique pour les mains
- 1 paire de gants T.M en latex sous emballage portefeuille
- 5 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm
- 1 champ absorbant imperméable troué 75 x 90 cm
- 1 seringue 10 ml*
- 1 ampoule d'eau stérile
- 1 gel lubrifiant
- 1 poche de recueil 2 litres vidangeable avec valve anti-reflux

► Hors blister :

+ 1 sac à déchets de soins (perforants interdits)

+ 1 fiche mode d'emploi

► **Prescrire**** : xxx MediSet® Sondage urinaire, avec poche de recueil de 2 litres intégrée - QSP pour xxx pose de sonde urinaire avec poche de recueil

Attention : Délivrance maximum d'un MediSet® Sondage/jour

Désignation	Référence	Nbre blisters / boîte	Code ACL	Tarif LPPR
MediSet® Sondage urinaire avec poche de recueil 2 litres intégrée	470844	1	4363768	8,30 €

* Sous présentation stérile apyrogène.

** Le remboursement de MediSet® Sondage exclut le remboursement des sondes PVC ou polyuréthane avec traitement de surface hydrophile autolubrifiant. Codes LPPR : 1189287-1165186-1130325-1111836-1169445-1140909.

*** Remboursé Sécurité Sociale.



MediSet® Sondage,

Set de sondage urinaire avec poche* de recueil 2 litres intégrée

(Sonde non incluse dans le set)

► Mode d'emploi :



- Préparation du sac collecteur de déchets.
- Procéder à un lavage hygiénique des mains.
- Procéder à la toilette génitale à l'aide du gant de toilette intraversable et du carré d'essuyage (**utiliser de l'eau et du savon de marseille**).



- Préparer le matériel nécessaire à la pose de la sonde peler les emballages de la sonde et de la poche de recueil. Les laisser à plat (sonde non fournie dans le set).
- Nettoyage des mains à l'aide du gel antiseptique.



- Enfiler un premier gant. Déplier le champ de table et y déposer tampons et compresses. Imbiber les tampons et compresses à l'aide de l'antiseptique prescrit. Enfiler le second gant.
- Réaliser **la toilette antiseptique** :



- **Chez l'homme** : nettoyer de l'avant vers l'arrière la partie distale de la verge à l'aide des tampons, les compresses servant à tenir le pénis. Asperger le gland et l'orifice urétral de l'antiseptique prescrit.



- **Chez la femme** : nettoyer d'abord la vulve à l'extérieur à l'aide des tampons puis maintenir écartées, à l'aide des compresses, les grandes lèvres et petites lèvres. Nettoyer à l'aide des tampons (un tampon restera éventuellement dans l'orifice vaginal).



- Asperger le méat urinaire de l'antiseptique prescrit.
- Oter les gants. Mettre le masque.
- Nettoyage des mains à l'aide du gel antiseptique.
- Enfiler les gants.



- Installer le champ stérile troué et le matériel nécessaire au sondage. Remplir la seringue d'eau stérile.
- Tester le ballonnet. Connecter la sonde à la poche* de recueil. Lubrifier la sonde. Introduire la sonde. Gonfler le ballonnet avec la quantité d'eau préconisée.



- Retirer le champ.
- Rassembler les déchets dans le sac collecteur.

* Voir Mode d'emploi de la poche Molifree 2L fournie dans le set



MediSet® Sondage,

set de sondage urinaire



► Blister contenant :

Toilette hygiénique :

- 1 seringue 10 ml*
- 1 gant de toilette en nontissé
- 1 carré d'essuyage 30 x 40 cm

Toilette antiseptique :

- 1 sachet de gel hydro-alcoolique pour les mains
- 1 paire de gants d'examen T.M en latex présentés manchettes retournées
- 1 champ absorbant imperméable 60 x 60 cm
- 5 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm
- 5 tampons en nontissé taille prune

Sondage :

- 1 masque de soins chirurgical
- 1 sachet de gel hydro-alcoolique pour les mains
- 1 paire de gants T.M en latex sous emballage portefeuille
- 5 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm
- 1 champ absorbant imperméable troué 75 x 90 cm
- 1 seringue 10 ml*
- 1 ampoule d'eau stérile
- 1 gel lubrifiant

► Hors blister :

+ 1 sac à déchets de soins (perforants interdits)

+ 1 fiche mode d'emploi

► Prescrire** :

xxx MediSet® Sondage urinaire,
QSP pour xxx pose de sonde urinaire

Attention : Délivrance maximum d'un MediSet® Sondage/jour

Désignation	Référence	Nbre blisters / boîte	Code ACL	Tarif LPPR
MediSet® Sondage urinaire	470845	1	4363751	6,10 €

* Sous présentation stérile apyrogène.

** Le remboursement de MediSet® Sondage exclut le remboursement des sondes PVC ou polyuréthane avec traitement de surface hydrophile autolubrifiant.
Codes LPPR : 1189287-1165186-1130325-1111836-1169445-1140909.

*** Remboursé Sécurité Sociale.



MediSet® Sondage, set de sondage urinaire (Sonde non incluse dans le set)

► Mode d'emploi :



- Préparation du sac collecteur de déchets.
- Procéder à un lavage hygiénique des mains.
- Procéder à la toilette génitale à l'aide du gant de toilette intraversable et du carré d'essuyage (**utiliser de l'eau et du savon de marseille**).



- Préparer le matériel nécessaire à la pose de la sonde peler les emballages de la sonde et de la poche de recueil. Les laisser à plat (sonde non fournie dans le set).
- Nettoyage des mains à l'aide du gel antiseptique.



- Enfiler un premier gant. Déplier le champ de table et y déposer tampons et compresses. Imbiber les tampons et compresses à l'aide de l'antiseptique prescrit. Enfiler le second gant.
- Réaliser **la toilette antiseptique** :



- **Chez l'homme** : nettoyer de l'avant vers l'arrière la partie distale de la verge à l'aide des tampons, les compresses servant à tenir le pénis. Asperger le gland et l'orifice urétral de l'antiseptique prescrit.



- **Chez la femme** : nettoyer d'abord la vulve à l'extérieur à l'aide des tampons puis maintenir écartées, à l'aide des compresses, les grandes lèvres et petites lèvres. Nettoyer à l'aide des tampons (un tampon restera éventuellement dans l'orifice vaginal).



- Asperger le méat urinaire de l'antiseptique prescrit.
- Oter les gants. Mettre le masque.
- Nettoyage des mains à l'aide du gel antiseptique.
- Enfiler les gants.



- Installer le champ stérile troué et le matériel nécessaire au sondage. Remplir la seringue d'eau stérile.
- Tester le ballonnet. Connecter la sonde à la poche* de recueil. Lubrifier la sonde. Introduire la sonde. Gonfler le ballonnet avec la quantité d'eau préconisée.



- Retirer le champ.
- Rassembler les déchets dans le sac collecteur.