

## Mise en garde

Les poches collectrices d'urine usagées doivent être traitées comme des déchets ménagers. Ne pas les jeter dans les toilettes.  
Les produits contenant du latex sont à stocker à l'abri de la chaleur.  
Le système collecteur Molifree® est pris en charge par la LPPR\*\* (en dehors du set).  
Cette prise en charge est de 100 % dans le cas d'une affection longue durée.

## Présentation

	Code ACL
MediSet® Sondage urinaire Nécessaire pour 1 soin	4363751
MediSet® Sondage urinaire avec poche de recueil 2 Nécessaire pour 1 soin	4363768

## Prescrire

Docteur Jean Martin  
2, rue de la Place  
75001 PARIS

*Faire pratiquer par IDE à domicile la pose  
ou le renouvellement d'une sonde à demeure*

*Tous les ..... jours*

*(y compris dimanche et jours fériés si nécessaire).*

.....X MediSet sondage urinaire

code ACL : 4363751

.....X MediSet sondage urinaire avec poche

de recueil 2 L

code ACL : 4363768

Pour toutes informations techniques  
contactez notre infirmière conseil au :

**0 800 17 37 57** (Appel gratuit)

e-mail : [soindom@hartmann.info](mailto:soindom@hartmann.info)

Laboratoires PAUL HARTMANN • Châtenois • F • 67607 Sélestat Cedex  
Tél. : 03 88 82 43 43 • Fax : 03 88 82 44 65 • [www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

HARTMANN



## MediSet® Sondage

Des sets de soins conçus pour le sondage  
urinaire à domicile



## Indications

Sets permettant de réaliser la toilette hygiénique et antiseptique avant la pose de la sonde urinaire. Ne contiennent pas de sonde urinaire.

## Composition

### MediSet® Sondage

Set de sondage urinaire

#### Nécessaire pour 1 soin

##### 1 blister stérile contenant

- 1 gant de toilette nontissé
- 1 carré d'essuyage 30 x 40 cm
- 1 sachet de gel antiseptique pour les mains
- 1 paire de gants d'examen T7/8 en latex, manchettes retournées
- 1 champ absorbant imperméable 60 x 60 cm
- 5 compresses nontissé 7,5 x 7,5 cm
- 5 tampons prune nontissé
- 1 masque de soins
- 1 sachet de gel antiseptique pour les mains
- 1 paire de gants T7 en latex manchettes longues sous emballage portefeuille
- 5 compresses nontissé 7,5 x 7,5 cm
- 1 champ absorbant imperméable troué 75 x 90 cm
- 1 ampoule d'eau stérile
- 1 gel lubrifiant
- 2 seringues de 10 ml\*

#### Hors blister

- + 1 mode d'emploi
- + 1 sachet pour élimination des déchets

### MediSet® Sondage

Set de sondage urinaire avec poche de recueil 2 litres intégrée

#### Nécessaire pour 1 soin

##### 1 blister stérile contenant

- 1 gant de toilette nontissé
- 1 carré d'essuyage 30 x 40 cm
- 1 sachet de gel antiseptique pour les mains
- 1 paire de gants d'examen T7/8 en latex, manchettes retournées
- 1 champ absorbant imperméable 60 x 60 cm
- 5 compresses nontissé 7,5 x 7,5 cm
- 5 tampons prune nontissé
- 1 masque de soins
- 1 sachet de gel antiseptique pour les mains
- 1 paire de gants T7 en latex manchettes longues sous emballage portefeuille
- 5 compresses nontissé 7,5 x 7,5 cm
- 1 champ absorbant imperméable troué 75 x 90 cm
- 1 ampoule d'eau stérile
- 1 gel lubrifiant
- 2 seringues de 10 ml\*
- 1 poche de recueil 2 litres vidangeable avec valve anti-reflux

#### Hors blister

- + 1 mode d'emploi
- + 1 sachet pour élimination des déchets

# MediSet® Sondage

## Set de sondage urinaire

### Protocole d'utilisation



- Préparation du sac collecteur de déchets. Procéder à un lavage hygiénique des mains. Procéder à la toilette génitale à l'aide du gant de toilette intraversable et du carré d'essuyage (**utiliser de l'eau et du savon de marseille**).



- Préparer le matériel nécessaire à la pose de la sonde peeler les emballages de la sonde et de la poche de recueil. Les laisser à plat (sonde et poche non fournis dans le set). Nettoyage des mains à l'aide du gel antiseptique.



- Enfiler un premier gant. Déplier le champ de table et y déposer tampons et compresses. Imbiber les tampons et compresses à l'aide de l'antiseptique prescrit. Enfiler le second gant.



- **Réaliser la toilette antiseptique chez l'homme** : nettoyer de l'avant vers l'arrière la partie distale de la verge à l'aide des tampons, les compresses servant à tenir le pénis. Asperger le gland et l'orifice urétral de l'antiseptique prescrit.



- **Réaliser la toilette antiseptique chez la femme** : nettoyer d'abord la vulve à l'extérieur à l'aide des tampons puis maintenir écartées, à l'aide des compresses, les grandes lèvres et petites lèvres. Nettoyer à l'aide des tampons (un tampon restera éventuellement dans l'orifice vaginal).



- Asperger le méat urinaire de l'antiseptique prescrit. Oter les gants puis mettre le masque. Nettoyage des mains à l'aide du gel antiseptique. Enfiler les gants.



- Installer le champ stérile troué et le matériel nécessaire au sondage. Remplir la seringue d'eau stérile. Tester le ballonnet. Connecter la sonde à la poche de recueil. Lubrifier la sonde. Introduire la sonde. Gonfler le ballonnet avec la quantité d'eau préconisée.



- Retirer le champ. Rassembler les déchets dans le sac collecteur.

### Renouvellement

MediSet® Sondage s'utilise à chaque changement de sonde urinaire. Pour une parfaite hygiène les poches collectrices doivent être changées tous les jours.

# MediSet® Sondage

## Set de sondage urinaire avec poche de recueil 2 litres intégrée

### Protocole d'utilisation



- Préparation du sac collecteur de déchets. Procéder à un lavage hygiénique des mains. Procéder à la toilette génitale à l'aide du gant de toilette intraversable et du carré d'essuyage (**utiliser de l'eau et du savon de marseille**).




- Préparer le matériel nécessaire à la pose de la sonde peeler les emballages de la sonde et de la poche de recueil. Les laisser à plat (sonde non fournie dans le set). Nettoyage des mains à l'aide du gel antiseptique.



- Enfiler un premier gant. Déplier le champ de table et y déposer tampons et compresses. Imbiber les tampons et compresses à l'aide de l'antiseptique prescrit. Enfiler le second gant.



- **Réaliser la toilette antiseptique chez l'homme** : nettoyer de l'avant vers l'arrière la partie distale de la verge à l'aide des tampons, les compresses servant à tenir le pénis. Asperger le gland et l'orifice urétral de l'antiseptique prescrit.

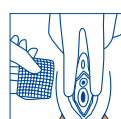

- **Réaliser la toilette antiseptique chez la femme** : nettoyer d'abord la vulve à l'extérieur à l'aide des tampons puis maintenir écartées, à l'aide des compresses, les grandes lèvres et petites lèvres. Nettoyer à l'aide des tampons (un tampon restera éventuellement dans l'orifice vaginal).



- Asperger le méat urinaire de l'antiseptique prescrit. Oter les gants puis mettre le masque. Nettoyage des mains à l'aide du gel antiseptique. Enfiler les gants.



- Installer le champ stérile troué et le matériel nécessaire au sondage. Remplir la seringue d'eau stérile. Tester le ballonnet. Connecter la sonde à la poche de recueil. Lubrifier la sonde. Introduire la sonde. Gonfler le ballonnet avec la quantité d'eau préconisée.



- Retirer le champ. Rassembler les déchets dans le sac collecteur.

### Renouvellement

MediSet® Sondage s'utilise à chaque changement de sonde urinaire. Pour une parfaite hygiène les poches collectrices doivent être changées tous les jours.

