

MediSet®

Curette dermatologique double à usage unique Ø 7 mm

Notice d'utilisation

Caractéristiques

Curette dermatologique à usage unique de diamètre 7 mm composée d'un manche présentant 2 extrémités :

L'une annulaire⁽¹⁾, en métal, dont l'un des bords est tranchant, protégé par un capuchon protecteur⁽²⁾ ;

L'autre en forme de cuillère⁽³⁾, composée d'une matière plastique semi-rigide dont l'extrémité distale forme une arête.

Le manche⁽⁴⁾ dont la partie centrale est aplatie, comporte une zone centrale plus large et striée⁽⁵⁾ pour une meilleure préhension de celui-ci ;

L'extrémité comportant l'anneau coupant est dotée d'un creux⁽⁶⁾ permettant le logement du pouce pour faciliter la prise en main et le bon contrôle du geste.

Le bord tranchant de l'anneau⁽¹⁾ est aisément reconnaissable car se situant dans le sens opposé du creux⁽⁶⁾.



Indications

- Se conformer à la prescription médicale. L'examen de la plaie doit permettre d'évaluer la présence de tissus nécrotiques et de fibrine entravant la cicatrisation et devant être éliminés.
- Plaies chroniques présentant des tissus nécrotiques et de la fibrine (ulcère, escarre) entraînant des retards de cicatrisation. La déterision mécanique se fera éventuellement en complément d'une action de déterision autolytique à l'aide de pansements hydrogels ou irrigo-absorbants (Hydroclean®) afin de favoriser le ramollissement des tissus nécrotiques ou de la fibrine à déterger.
- Kératoses.

Mode d'emploi

- **Utilisation de l'extrémité annulaire à bord tranchant⁽¹⁾** : saisir le manche de manière à caler le pouce dans le creux et avoir une bonne prise en main. Retirer le capuchon⁽²⁾ hors de la plaie. Gratter délicatement, parallèlement à la zone ciblée en évitant de faire saigner et de faire mal. Selon l'avis médical, un anesthésique local pourra être prescrit préalablement à l'acte de déterision mécanique.
- **Utilisation de l'extrémité "cuillère"⁽³⁾** : permet de gratter et d'éliminer les tissus mous. Utiliser l'extrémité distale formant une arête.

Précautions

Patients diabétiques et/ou douloureux, limiter la déterision aux tissus dévitalisés en évitant de faire saigner le patient.

CE 0123  REF 478112

 Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

Date de création de la notice : 2010-05

La réutilisation des dispositifs médicaux à usage unique est dangereuse. Informations sur demande.

 Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl - Châtenois - F - 67607 Sélestat Cedex

Pour toutes informations techniques contactez notre infirmière conseil au :

0 800 17 37 57 (Appel gratuit)

e-mail : cicatrisation@hartmann.fr